

FICHA TÉCNICA



PRODUCTO	Termómetro Infrarrojo de frente - sin contacto
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase IIa
MARCA	CALI-MEDI
REF. FABRICANTE	DT-8836M
REF. IMPORTADOR	TI002CLB

DESCRIPCIÓN

Termómetro diseñado para medir la temperatura corporal, con desplazamiento dinámico de la temperatura ambiente y la temperatura corporal. De uso exclusivo, con onda infrarroja para la medición de la temperatura, con alta precisión de medición y un rendimiento más estable.

Ofrece la función de notificación sonora de temperatura corporal alta, tiene la capacidad de almacenar 32 mediciones y la función de apagado automático para ahorrar energía.

Es compatible con productos de desinfección y cuenta con manual de instrucciones y calibración.

CARACTERÍSTICAS

RANGO DE MEDICIÓN CORPORAL/SUPERFICIE	32.0-43.0°C / 0.0-100.0°C
TIEMPO DE MEDICIÓN	0,5 s
DISTANCIA DE MEDICIÓN	1 – 3 cm
PRECISIÓN	± 0.2°C (cuerpo) / ± 0.1°C (superficie)
RESOLUCIÓN	± 0.1°C
MEMORIA	32 mediciones
APAGADO AUTOMÁTICO	15 s
PESO	172 g
TAMAÑO	132 mm x 98 mm x 36 mm
CANTIDAD	1 ud./pack
MARCADO CE	Sí
ORGANISMO NOTIFICADO	TÜV Rheinland LGA Products GmbH (Nº: 0197)

INSTRUCCIONES DE USO

- Apuntar el termómetro en el centro de la frente o en el oído y mantenerlo en posición vertical a una distancia de unos 3-5 cm.
- Presionar el botón de medición e inmediatamente se mostrará el valor de la temperatura actual en la pantalla de visualización.
- Capaz de almacenar 32 mediciones automáticamente (presionar las teclas de dirección hacia arriba y hacia abajo para comprobar los últimos 32 datos de medición almacenados).